




Gebrauchsinformation

Praktische Anwendung der Nadelreizmatte:

In der traditionellen chinesischen Medizin stellt die Anwendung der Nadelreizmatte eine Kombination zwischen Akupunktur, bzw. Akupressur und Tuina dar. Meridiane innerhalb der Körperoberfläche werden unspezifisch gereizt, wodurch sogenannte energetische Störungen innerhalb des Organismus ausgeglichen, d.h. gedämpft werden können. Die traditionelle chinesische Medizin unterscheidet 14 Meridiane mit ca. 700 Akupressurpunkten. Im Allgemeinen ist die Nadelreizmatte täglich für 15 bis ca. 30 Minuten zu applizieren.

Die ersten zwei bis drei Minuten werden als sehr schmerzhaft (Sympathikusaktivierung) empfunden.

Danach erfolgt zunehmend ein angenehmes Wärme- und Entspannungsgefühl (Parasympathikusaktivität). Es ist anzuraten die erste Anwendung mit der Nadelreizmatte gemeinsam mit einem Arzt oder Therapeuten vorzunehmen, um bei möglichen Komplikationen (Zunahme der Schmerzen, bzw. Kreislaufprobleme) den therapeutischen Vorgang abzubrechen. Tritt der gewünschte Therapieeffekt (Reduktion der Primärsymptomatik) ein, kann die Nadelreizmatte für die Eigenapplikation dem Patienten ausgehändigt werden.

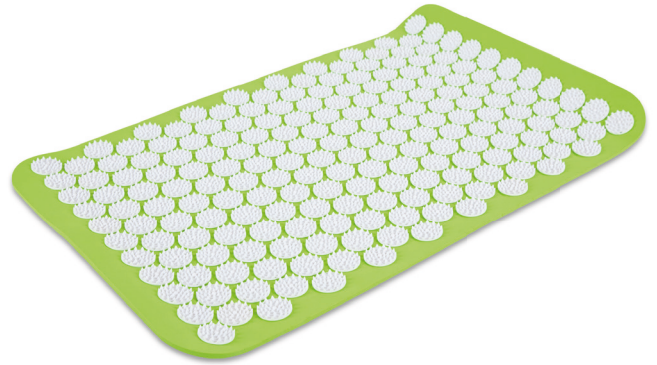

Ergänzende Informationen:

Der Nadelreizmatte besteht aus hochwertigen Materialien und ist somit pflegeleicht und gut zu reinigen (Desinfektion – Hygienevorschriften). Die Standardgröße beträgt 65 X 40 cm. Die Nadelreizmatte besteht aus 230 einzelnen Reizelementen und je 27 Druckpunkten. Inklusive praktischer Tragetasche.

Pflegehinweis zur Erhaltung der langfristigen Qualität Ihrer Nadelreizmatte:

1. Nach Gebrauch die Matte und Nadelringe sorgfältig mit handwarmem Wasser abspülen bzw. abwaschen.
2. Zur Desinfektion die Matte und Nadelringe zusätzlich vorsichtig nur mit medizinischem Alkohol und einem Baumwolltuch abwischen, trocknen lassen und anschließend mit gereinigtem Wasser abwaschen.
3. Legen Sie Ihre Nadelreizmatte anschließend auf einen sauberen, trockenen und ebenen Platz zum Trocknen.
4. Lagern Sie die Matte zur Aufbewahrung immer in der dazugehörigen Tragetasche an einem trockenen, dunklen und kühlen Platz.

Wichtig:

Benutzen Sie bitte niemals Desinfektionsmittel die Oxidations- oder Reduktionsmittel enthalten. Setzen Sie die Matte beim Trocknen keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bitte ebenso keinen Wäschetrockner oder sonstige unübliche Wege für die Trocknung Ihrer Nadelreizmatte benutzen.



Vermeiden Sie, dass Ihre Nadelreizmatte mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und schützen Sie sie vor Hitze, Staub und Sonneneinstrahlung.

Die Nadelreizmatte ist kein Spielzeug, stellen Sie sicher dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes wird keinerlei Haftung übernommen.

Vertrieb:

HANDELSHAUS DITTMANN INTERNATIONAL GMBH • Kissinger Str. 68 • 97727 Fuchsstadt-Germany
Tel: 09732 - 9144 - 0 • Fax 09732 - 9144 - 44